

## 注意事項 ⚠

- ・本品は患者の体位を保持し、床ずれを防止するためのパッドです。それ以外の目的で使用しないでください。
- ・本品は、患者の体位や身体状態等すべてのケースで床ずれ防止を保証するものではありません。万一、本品使用中に床ずれが発生・進行したときはすぐに医師にご相談ください。
- ・オートクレーブ滅菌（高圧蒸気滅菌）はしないでください。
- ・使用前に、汚れ、ピンホール、傷、破損、変形がないか点検して使用してください。破損等ある場合は使用しないでください。
- ・フィルムが破れる危険性がありますので、鋭利な機器をゲル製品に置かないでください。
- ・患者が横たわっている状態で、本品を引っ張らないでください。あまりに強い力を加えると、製品に悪影響を与えます。
- ・粗い表面のものや、鋭利なものに沿って、本品を引っ張らないでください。
- ・本品を切ったり、裂いたりしないでください。
- ・本品を、直火や極端に温度が高いものにさらさないでください。
- ・本品を持ち上げる際は、本品の下側より持ち上げてください。
- ・マジックテープの接着に影響する可能性がありますので、マジックテープ等で本品を固定するのはお勧めしません。

### <クリーニングと保管>

- ・本品の清掃には、一般的な中性洗剤を使用し、酸性洗剤又は有機溶剤は使用しないでください。
- ・本品を洗浄液、消毒液に長時間浸さないでください。
- ・アルコールでの消毒は行わないでください。
- ・-20℃から50℃までの、直射日光が当たらない室内の平坦な場所に保管してください。
- ・折りたたむ場合はできるだけ大きく折りたたんでください（少なくとも一辺35cm以上）。

製造販売元

**エア・ウォーター・リンク株式会社**

特販部 海外事業課

〒612-8418

京都市伏見区竹田向代町132番地1

TEL 075-694-1063 FAX 075-694-1071

東京営業所

〒113-0034

東京都文京区湯島2丁目2-4 スワンビル7階

TEL 075-694-1063 FAX 075-694-1071

<http://www.awlink.co.jp>

[email-import@awlink.co.jp](mailto:email-import@awlink.co.jp)

お問い合わせ・ご用命は

# GEL PAD

ゲルパッド

床ずれ防止に




ゲルパッドは、手術の際に、患者のポジショニングに使用することで、体重を均等に分散でき、過度な圧力や毛細血管の圧迫を防ぐことができます。毛細血管の血流障害は、床ずれの原因となります。ゲルパッドは、費用効率が高く、ラテックスフリーで、素早く、簡単にクリーニングが可能です。

- 豊富なバリエーションで、使用箇所に応じて選択可能
- お求めやすいリーズナブルな価格設定
- 優れた耐久性

Pressure Injury Free Gel Products

 **エア・ウォーター・リンク株式会社**

頭部用

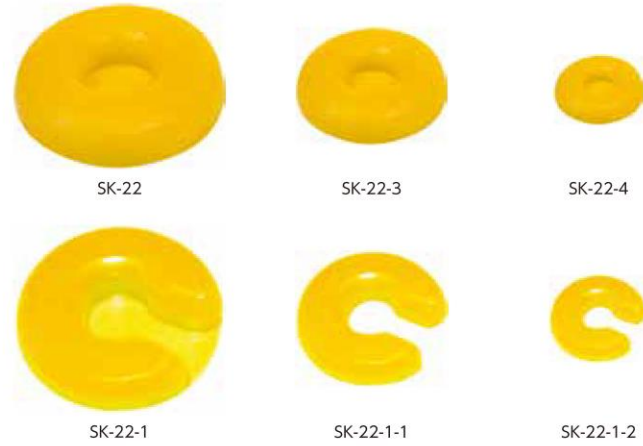

ドーナツタイプ

SK-22	D20 x H4.5 (cm)
SK-22-3	D15 x H3.5 (cm)
SK-22-4	D9.2 x H2.4 (cm)

C ドーナツタイプ

SK-22-1	D21 x H4.5 (cm)
SK-22-1-1	D15 x H3.5 (cm)
SK-22-1-2	D9.2 x H2.4 (cm)

- うつむけ、横臥位の際の頭部の安定に
- 空気やチューブを妨げない(C ドーナツタイプのみ)

腹臥位用、仰臥位用




ヘッドレストタイプ

SK-22-2	L27 x W24 x H15.0 (cm)
SK-22-a	L31 x W27 x H10.0 (cm)
SK-22-b	L31 x W25 x H7.3 (cm)
SK-22-c	L23 x W23 x H5.7 (cm)
SK-22-d	L19 x W21.6 x H3.8 (cm)
SK-22-e	L18 x W18 x H8.0 (cm)

- 仰向け体位時に、患者の頭部を安定させたいときに
- 頭部輪郭線がくり抜かれており、頭部にぴったりフィットします
- 眼科、歯科、顔面の処置用に

ボディ用

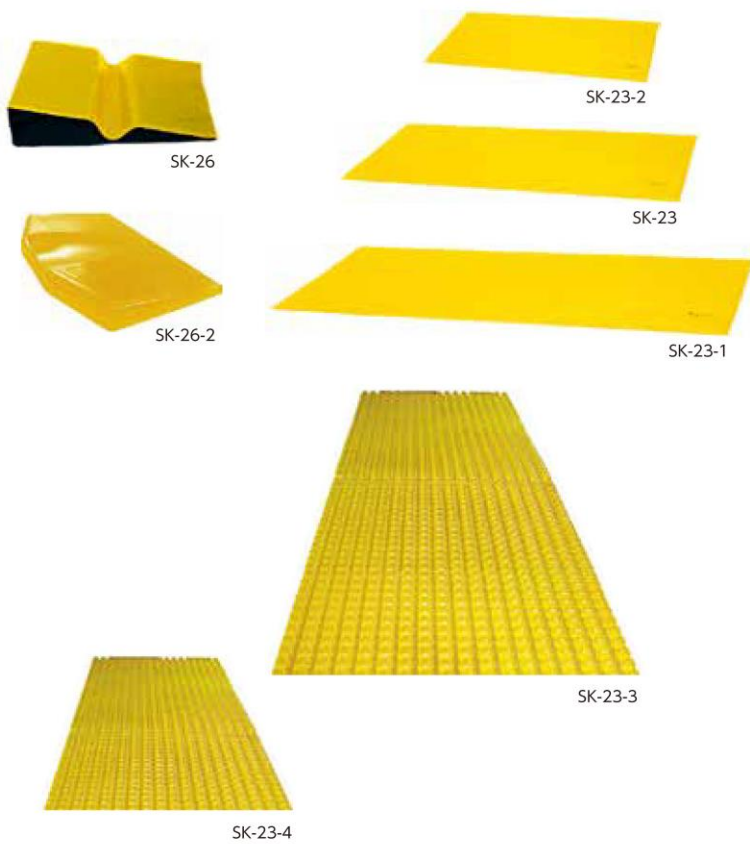

シートタイプ

SK-23	L160 x W50 x H1.3 (cm)
SK-23-1	L183 x W50 x H1.3 (cm)
SK-23-2	L84 x W50 x H1.3 (cm)
SK-23-1-1	(a + b + c) 3個セット
SK-23-1-1a	L50 x W23 x H1.3 (cm)
SK-23-1-1b	L100 x W50 x H1.3 (cm)
SK-23-1-1c	L50 x W50 x H1.3 (cm)
SK-23-3	L160 x W45 x H1.6 (cm)
SK-23-4	L80 x W45 x H1.6 (cm)
SK-23-5	L60 x W33 x H1.3 (cm)
SK-23-5-1	L60 x W40 x H1.3 (cm)
SK-24	L42 x W42 x H1.3 (cm)
SK-24-2	L38 x W38 x H1.3 (cm)
SK-24-2-1	L40 x W40 x H1.0 (cm)
SK-24-2-2	L40 x W45 x H1.0 (cm)
SK-24-3	L32 x W32 x H1.3 (cm)
SK-24-1	L40 x W45 x H1.6 (cm)
SK-25	L40 x W24 x H1.0 (cm)
SK-25-1	L50 x W52 x H1.0 (cm)
SK-26	L70 x W50 x H12.0/0.8 (cm)
SK-26-2	L45 x W30 x H7.0 (cm)
SK-28	L20 x W11 x H7.0 (cm)
SK-28-1	L16 x W8.5 x H5.0 (cm)

- 広範囲の処置用に
- 横臥、うつ伏せの状態でも、使用可能
- 手術台の上で、圧点を分散し床ずれを防止します

# GEL PAD

## ゲルパッド

床ずれ防止に



- 豊富なバリエーションで、使用箇所に応じて選択可能
- お求めやすいリーズナブルな価格設定
- 優れた耐久性

材質はポリウレタンフィルム(外皮) ポリウレタンジェル(中身) です

肩用、胸部用、体位固定用



ブロックタイプ

SK-27-a	L25 x W13 x H3.0 (cm)	SK-27	L47 x W10 x H5.0 (cm)
SK-27-b	L35 x W12 x H3.0 (cm)	SK-27-1	L47 x W15 x H8.0 (cm)
SK-27-c	L46 x W11 x H3.0 (cm)	SK-27-2	L47 x W15 x H12.0 (cm)
SK-27-d	L70/58 x W20 x H5.0 (cm)	SK-27-3	L25 x W15 x H8.0 (cm)
SK-27-e	L70/58 x W20 x H5.0 (cm)	SK-27-4	L52 x W10 x H8.0 (cm)

- どんな患者にも広範囲に使用可能 患者のポジショニングに
- うつ伏せの体位において、患者の胸部圧迫を保護します

足首用




ヒールタイプ

SK-28	L20 x W11 x H7.0 (cm)
SK-28-1	L16 x W8.5 x H5.0 (cm)
SK-28-2	L17 x W18 x H1.3 (cm)
SK-28-3	L17 x W23 x H1.3 (cm)

- かかと突起部分及びアキレス腱部分の保護に

腕部用

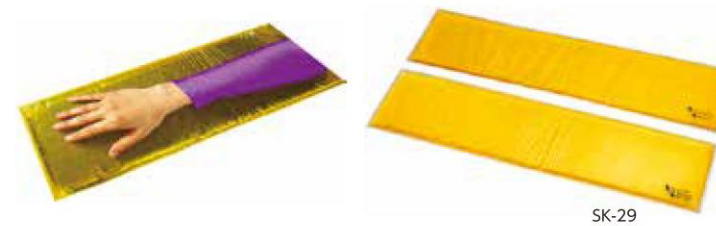

アームタイプ

SK-29	L55 x W15 x H1.3 (cm)
SK-29-1	L41 x W15 x H5.0 (cm)
SK-29-1a	L55 x W15 x H6.0 (cm)

- 腕部のポジショニング及び保護に